


Opvarmet knæbandage med infrarød lysterapi - justerbar varme i 5 niveauer



Kontrolenhed

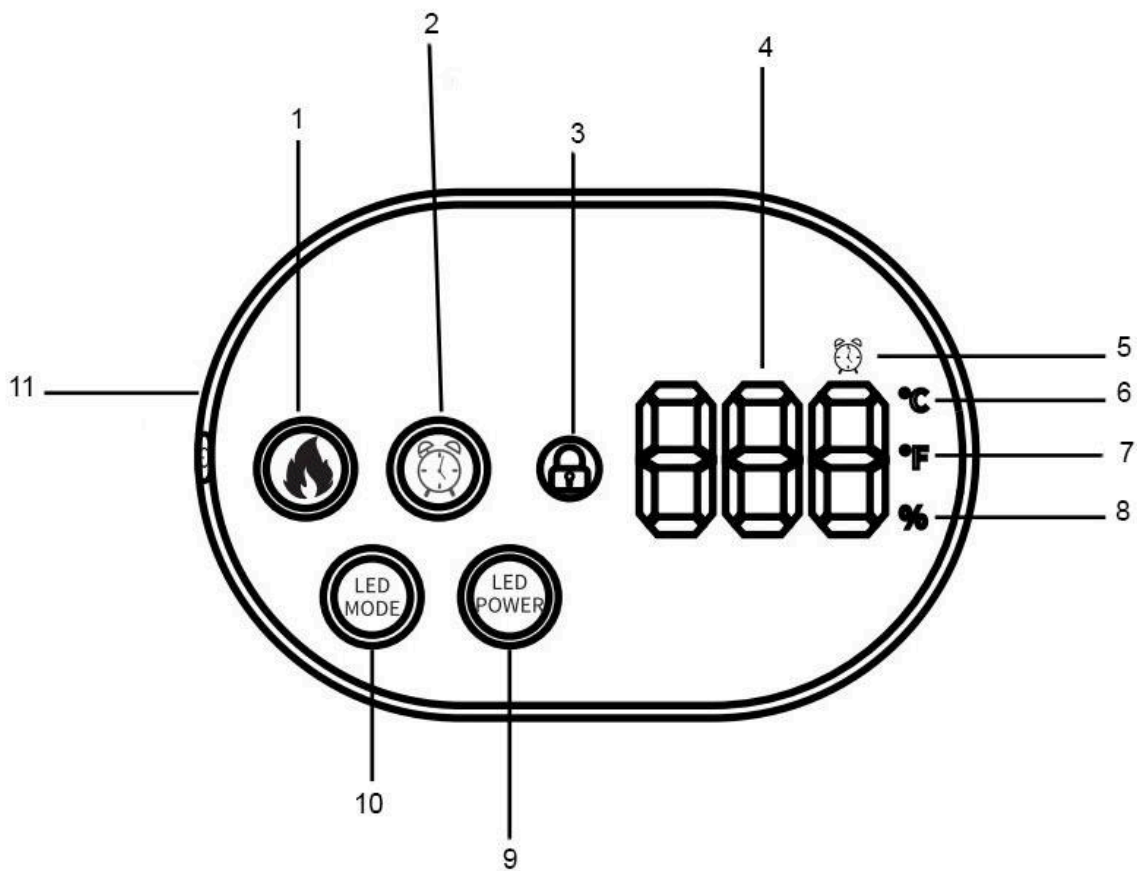


1. Varmeknap
2. Timerknap
3. Anti-fejltryk-indikator
4. Display
5. Timerindikator
6. Celsius (°C)
7. Fahrenheit (°F)
8. Opladningsstatus / aktuelt batteriniveau
9. LED-styrkeknap
10. LED-tilstandsknap
11. Tænd/sluk-knap / anti-fejltryk-knap

Bemærk: Tallet på displayet kan vise temperatur (°C/°F), opladningsstatus (%), eller den resterende timertid.

Når produktet er i brug og ikke oplades, viser displayet varmetemperaturen og det aktuelle batteriniveau. Når produktet oplades, viser displayet opladningsstatus.

Opladningsvejledning

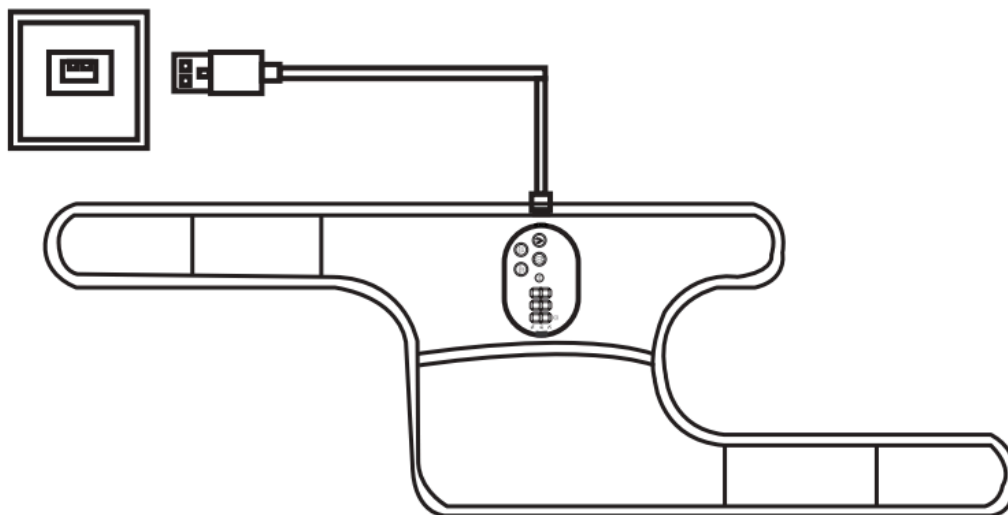

1. Oplad enheden i god tid, når batteriniveauet på kontrolenhedens display er under 20 %.
2. Når batteriniveauet falder til under 5 %, afgiver enheden en "di di"-lyd som påmindelse om opladning.
3. Sørg for, at enheden er slukket, før du oplader den.
4. Sæt Type-C-enden af opladningskablet i kontrolenheden, og tilslut derefter USB-enden til en 5V/2A strømkilde.
5. Når opladningen starter, vil den grønne indikatorlampe på kontrolenheden blinke langsomt. Tallet på displayet viser det aktuelle batteriniveau og stiger gradvist under opladningen.
6. Når displayet viser "FU", er enheden fuldt opladet.

Vigtigt:

Betjen ikke kontrolenheden under opladning. Knæbandagen kan ikke bruges, mens den oplades.

Brugervejledning

1. Sådan bæres enheden

Placer knæbandagen på **skulderen, albuen eller knæet** efter behov.

2. Tænd enheden

Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde enheden.

Hvis der ikke foretages nogen handling inden for 30 sekunder efter opstart, slukker enheden automatisk.

3. Rødlysfunktion

Bemærk: Når rødlysfunktionen er aktiveret, kan varmfunktionen ikke bruges.

Tryk på LED-tilstandsknappen for at aktivere rødlysfunktionen. Enheden starter som standard i ALL-tilstand.

Tryk på knappen igen for at skifte tilstand i følgende rækkefølge:

- **2. tryk:** 660-tilstand
- **3. tryk:** 850-tilstand
- **4. tryk:** Rødlys slukket

Bemærk: Når rødlysfunktionen er aktiv, udvikler LED-lysene varme, men temperaturen overstiger ikke 42 °C.

4. Justering af LED-styrke

Når du har valgt en LED-tilstand, kan du trykke på LED-styrkeknappen for at justere LED-strålingsfrekvensen.

Tilgængelige niveauer:

L1 (5Hz) / L2 (10Hz) / L3 (40Hz) / L4 (alle lys tændt)

Beskrivelse af tilstande:

- **L1: Blød (5Hz)** - velegnet til førstegangsbrug
- **L2: Mild (10Hz)** - velegnet til daglig hudpleje
- **L3: Stærk (40Hz)** - velegnet til lindring af smerte og træthed
- **L4: Dybdevirkende (alle lys tændt)** - velegnet til at fremme sårheling og restitution efter operation

Bemærk: LED-styrkeknappen fungerer kun i LED-tilstand. Den valgte frekvens forbliver uændret, selv når du skifter mellem LED-tilstande.

5. Varmefunktion

Bemærk: Når varmfunktionen er aktiveret, kan rødløsfunktionen ikke bruges.

Tryk på varmeknappen for at aktivere varmfunktionen. Displayet viser 00.

Tryk på knappen igen for at skifte temperaturniveau:

- **2. tryk:** 45 °C
- **3. tryk:** 50 °C
- **4. tryk:** 55 °C
- **5. tryk:** 60 °C
- **6. tryk:** 65 °C

Når temperaturen er valgt, vil tallet på displayet gradvist stige fra den aktuelle temperatur til den valgte temperatur.

6. Timerfunktion

Tryk på timerknappen for at aktivere timerfunktionen. Displayet viser 15, hvilket angiver en timer på 15 minutter.

Tryk på knappen igen for at ændre timerindstillingen:

- **2. tryk:** 30 minutter
- **3. tryk:** 40 minutter
- **4. tryk:** Timer slukket

Du kan også vælge ikke at bruge timerfunktionen.

7. Skift mellem °C og °F

Tryk på og hold varmeknappen og timerknappen nede samtidigt i 2 sekunder for at skifte temperaturenhed mellem °C og °F.

Gentag den samme handling for at skifte tilbage.

8. Anti-fejltryk-tilstand

Når du har valgt en funktion og indstillet tiden, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at aktivere anti-fejltryk-tilstand.

Når denne tilstand er aktiv:

- anti-fejltryk-indikatoren lyser rødt
- knapperne på kontrolenheden er låst

For at låse kontrolenheden op skal du trykke på tænd/sluk-knappen igen.

Anti-fejltryk-indikatoren lyser derefter grønt, hvilket betyder, at anti-fejltryk-tilstand er deaktiveret.

9. Sluk enheden

Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede for at slukke enheden.

Hvis timerfunktionen er aktiveret, slukker enheden automatisk, når den indstillede tid er udløbet.

Bemærk:

1. Rødløsfunktionen og varmfunktionen kan ikke bruges samtidig. Når den ene funktion aktiveres, slukkes den anden automatisk.
2. Når en af disse funktioner er i brug, kan knapperne til den anden funktion være uden reaktion. Dette er normalt og er ikke tegn på en fejl ved kontrolenheden.

Forholdsregler

1. Ved brug af **rødløsfunktionen** anbefales det, at enheden er i kontakt med huden.
2. Ved brug af **varmfunktionen** må enheden ikke være i direkte kontakt med bar hud, da dette kan medføre forbrændinger.
3. Sørg for, at knæbandagen er helt tør før brug.
4. Knæbandagen er **ikke vandtæt** og må ikke bruges i våde omgivelser.
5. Se ikke direkte ind i det røde lys, mens LED-lysene er tændt.
6. Opbevar knæbandagen på et rent og tørt sted.
7. Udsæt ikke knæbandagen for direkte sollys eller ild, da dette kan beskadige de varmeisolerende materialer.
8. Du må ikke adskille eller ændre kontrolenheden eller det interne kredsløb, da dette kan forårsage skade.
9. Gravide, små børn og personer, der ikke tydeligt kan udtrykke ubehag, må ikke bruge dette produkt.
10. Personer i højrisikogrupper bør kun bruge dette produkt efter råd fra en læge.

Sikkerhedsforanstaltninger

1. Når du bruger produktet første gang, skal du starte med en lav temperaturindstilling. Let rødme eller varme i huden efter brug kan være normalt. Hvis der opstår kraftig rødme, skal du straks stoppe brugen og kontakte en læge.
2. Det anbefales ikke at bruge den højeste temperaturindstilling i længere tid. Brug den ikke i mere end 40 minutter ad gangen.

3. Start med den laveste temperatur, og juster gradvist til et passende niveau efter personlig komfort. Dette er især vigtigt for personer med nedsat følsomhed over for varme, så forbrændinger undgås.
4. Begræns hver røddlyssession til 15-30 minutter.
5. Stop straks brugen af produktet, hvis du oplever ubehag som svimmelhed, hovedpine, astma eller andre usædvanlige reaktioner.
6. Sluk enheden efter brug, og opbevar den et sikkert sted.
7. Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug og erstatter ikke medicinsk udstyr eller medicin.
8. Brug altid enheden i overensstemmelse med vejledningen. Forkert brug kan medføre personskaade eller materiel skade.

Advarsel

Kontakt en læge før brug, hvis du:

- har osteoporose, brud, forstuvninger, akutte smerter eller andre lidelser i benene
- har nervelidelser i benene eller nedsat følesans i huden
- er gravid eller lige har født
- har hjertesygdom

Vigtigt:

Dette produkt har en varmfunktion. Personer med nedsat følsomhed over for temperatur bør bruge det med ekstra forsigtighed.

Rengøringsvejledning

1. Sørg for, at strømmen er helt afbrudt, før rengøring.
2. Tør knæbandagen forsigtigt af med en **fugtig klud**. Undgå, at der kommer vand i **Type-C-porten**.
3. Brug ikke stærke rengøringsmidler, opløsningsmidler eller hårde børster.
4. Læg produktet fladt til lufttørring.
5. Må ikke maskinvaskes eller håndvaskes.
6. Må ikke renses kemisk.