

Bebird Note 5 Pro

øre-rengøringsotoskop med kamera



Sådan forbinder du appen

Bemærk: Brug ikke enheden, medmindre du har tilsluttet enheden til din mobiltelefon via Android/iOS-appen og streamer live-videoptagelser.

1. Download APPEN

iOS: Søg efter “bebird” i App Store

Android: Søg efter “bebird” i Google Play



ELLER scan QR-koden for at downloade appen



2. Åbn dækslet / Tænder automatisk




3. Åbn APPEN / Tilslut enhedens WiFi




4. Tilslut produkt WiFi "bebird-Note5-xxxxxx"




5. Tilbage til bebird APP / Klik på "GO" for at bruge den

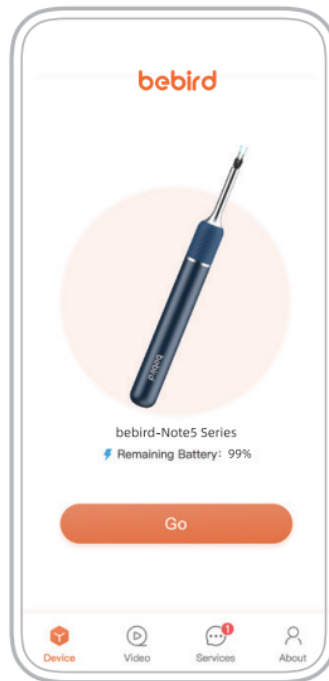


6. Den visuelle skærm

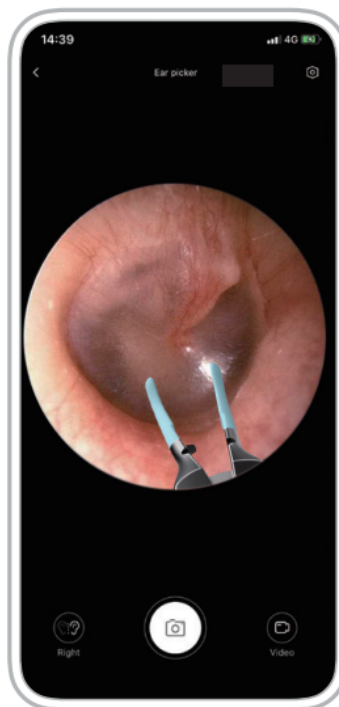

7. Tryk på knappen for at styre pincetten

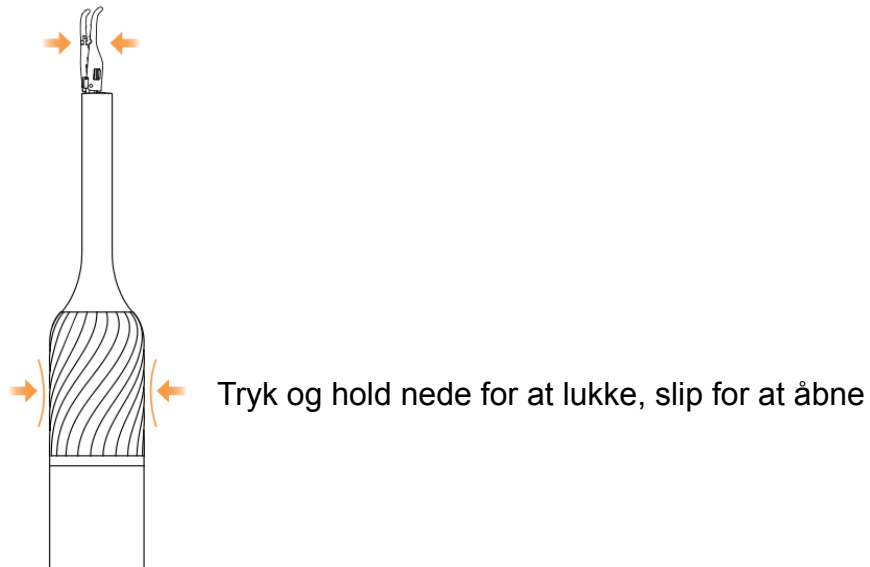


Produktoversigt

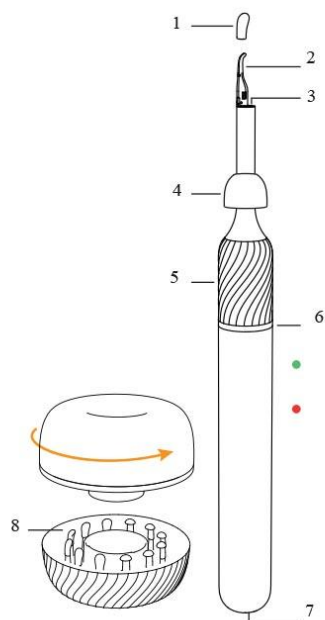


1. Silikone øreprop beskytter
2. Pincethoved
3. Linse
4. Ørekanal Beskyttelsesprop
 - Bevæg op og ned for at begrænse indsættelse dybden
5. Pincet-skift
 - Tryk og styr pincetten for at åbne og lukke
6. Indikatorlys
 - Grønt lys blinker efter start
 - Det røde lys lyser konstant under opladning. Når det er fuldt opladet, slukkes lyset.
7. Opladningsport
8. Stående base
 - Indeholder 12 stk. øreskeer

Sådan bruger du pincetten

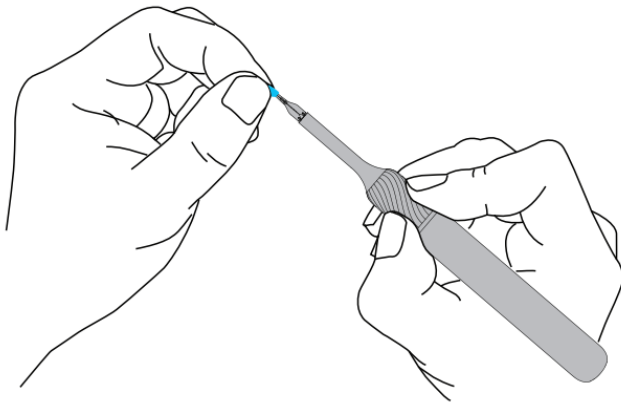


Hold pincetkontakten stille med 2 fingre, og fjern øreskeen med den anden hånd.

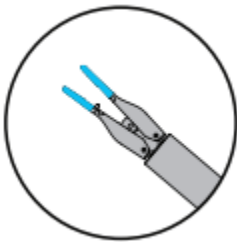

Pincetten åbner sig automatisk, når du slipper hånden.

Sådan udskifter du øreskeen

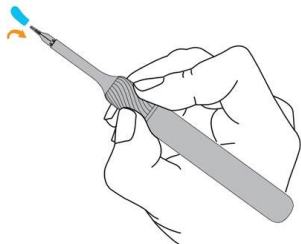


Tryk først på pincetkontakten, så pincetten er lukket. Sæt blot øreskesættet på.

Bemærk: Øreskeen skal placeres så dybt som muligt på pincetten for at forhindre den i at falde af.

Hvis øreskeen er beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge den og kontakte os for en udskiftning.

Tilbehør

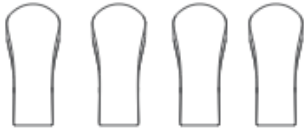

Spatel øreskop x4 - Flere øreskopbetræk, brug separat




Kuppelformede øreskoper x4 - Fjern nemt ørevoks i 360 grader



Svampebetræk til øreske x4 - Rent og behageligt, fjern ørevoks og rengør olieøret



Ørekanal Beskyttelsesprop - En berøring påmindelse for at undgå at række for dybt ind i øregangen!

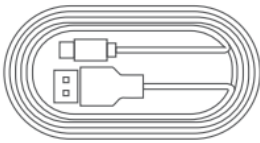

Opladningskabel



Alkoholservietter x5 - Rengøring af linsen eller skeen



Dobbeltsidig rengøringsbørste - Ruskindshoved til at aftørre linsen;
Børstehoved til at rengøre øreproppen

Fejlfinding

Intet svar efter opstart - Brug det medfølgende opladningskabel til at oplade enheden.

Kameraets LED-indikator lyser konstant - Frakobl enheden, genstart den, og tilslut den igen.

Appen lukker hurtigt - Slet den eksisterende app, og scan QR-koden for at geninstallere den.

Indikatorlampen blinker hurtigt - Oplad enheden med det medfølgende kabel.

Unormal visning i appen - Frakobl enheden, genstart den, og tilslut den igen.

Wi-Fi-forbindelsen er ustabil eller afbrydes efter et par sekunder: Frakobl enheden, genstart den, og tilslut den igen.

Sløret kameravisning - Rengør linsen med en dobbeltsidig rengøringsbørste eller en alkoholserviet.

Billedretningen er forkert under brug - Vælg venstre eller højre øretilstand i appen.

Bemærk: Hvis problemet fortsætter efter at have fulgt disse trin, skal du kontakte kundeservice for yderligere assistance.

Opmærksomhed

1. Brug den medfølgende alkoholserviet til at tørre linsen forsigtigt af under rengøring.
2. Øreskedåsen skal være korrekt monteret og ikke løs før brug for at forhindre, at den falder af.
3. Overhold venligst det omgivende miljø før brug. Brug det ikke i et miljø, der er modtageligt for stød.
4. Forbyd børn at bruge dette produkt alene for at undgå utilsigtede skader.
5. Læg ikke enheden i nogen form for væske.
6. Batteriet skal oplades en gang om måneden for effektiv brug.
7. Temperaturen vil stige en smule under brug.
8. Produktets temperatur vil stige en smule under brug (ifølge bebirds laboratoriedata overstiger den maksimale temperatur for hele maskinen ikke ca. 45 °C). Brug den gerne.