

Bebird T15 Smart Visual Ear-Clean

Ørerenser med kamera



iOS Søg efter “bebird” i App Store
Android Søg efter “bebird” i Google Play



Scan QR-koden for at downloade APPEN



Åbn dækslet - Tænder automatisk




Åbn APPEN - Tilslut enhedens WiFi



Tilslut WiFi

Tilslut produktets WiFi "bebird-T15-xxxxxx" / Tilbage til bebird APP Klik på "GO" for at bruge det

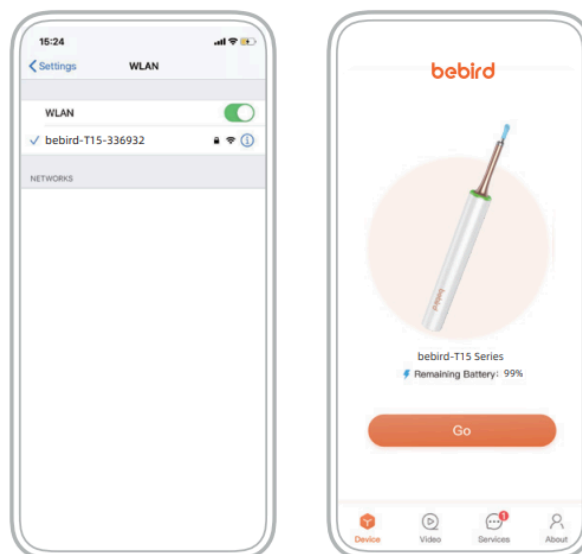

Udskift øreskehovedet

Drej øreskehovedet, træk øreskeen ud og sæt den i igen, og fastgør øreskehovedet.



Indsæt og fastgør øreskehovedet

Saml korrekt før brug for at undgå at det falder ud

Opladning - Rødt lys lyser altid

Tilbehør



Øreske indpakket i metal og silikone (lille) x 1
Uskadelig ørerensning



Dobbeltfarvet Q-elastisk øreske (lille) x 1
Grundlig fjernelse af ørevoks



Dobbeltfarvet ringformet øreske x 1
Nem skrabning; højere krumning



Dobbeltfarvet Q-elastisk øreske (stor) x 1
Nem og grundig fjernelse af ørevoks



Metal bumspresser x 1
Pres nemt bumser ud



Øresvamp x 2
Fjerner ørevoks og fedt i ørerne



Opbevaringsboks x 1
Opbevar tilbehør indeni



Opladningskabel x 1
TYPE-C opladningskabel

Fejlfinding

Virker produktet ikke efter opstart?

- Oplad venligst i 85 minutter med standard USB-kablet.

Kameraindikatoren lyser ikke?

- Sluk produktet, og genstart det.

Nedbrud af appen?

- Afinstaller APP'en, og scan QR-koden for at installere den igen.

Kan tilbehørsholderen ikke installeres problemfrit?

- Drej øreskehovedet, træk øreskeen ud og sæt den i igen, og fastgør øreskehovedet.

Lyser strømindikatoren rødt?

- Oplad venligst i 85 minutter med standard USB-kablet.

Viser appen ikke normalt efter oprettet forbindelse?

- Afbryd WiFi-forbindelsen mellem mobiltelefonen og produktet, genstart produktet, og opret WiFi-forbindelse igen.

Wi-Fi-forbindelsen er ustabil. Nogle gange afbrydes den blot et par minutter efter, at der er oprettet forbindelse.

- Genstart produktet, og tilslut appen igen.