

Brugermanual til Bærbar Alkometer




Specifikationer

- BAC* detektionsområde: 0.000-0.199 procent, 0.000-1.990 promille
- BrAC** detektionsområde: 0.000-0.995 mg/l
- Alarmgrænse: over 0.500 promille (0.250mg/l)
- Præcision: +/- 0.010 procent, +/- 0.100 promille, 0.050mg/l
- Opstartstid: mindre end 20 sekunder
- Omgivende temperatur ved betjening: 10-50 grader Celsius
- Batterier: 3 x AAA (ikke inkluderet)

*Koncentration af alkohol i blodet

**Koncentration af alkohol i udånding

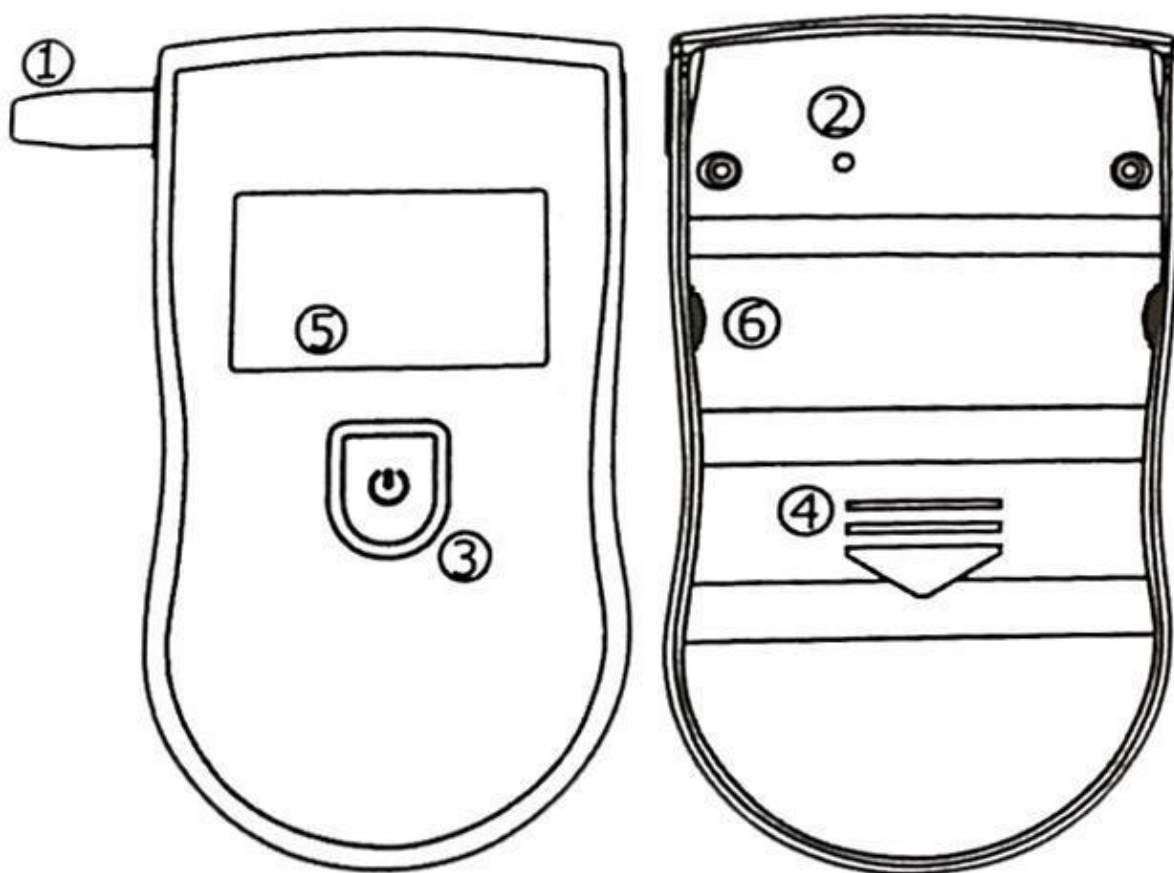

1. Mundstykke (udskifteligt)
2. Bipper
3. Tænd-knap
4. Rum til batterier
5. LCD-skærm
6. Indbygget låg til mundstykke

Indsætning af batterier

Følg nedenstående trin for at indsætte batterierne:

1. Åben batteridækslet på bagsiden.
2. Placer 3 AAA alkaliske batterier og følg instrukserne til de positive og negative batteripoler.
3. Luk dækslet igen.

Sådan betjener du alkometeret

Inden du begynder at bruge alkometeret, skal det varme op. For at varme det op skal du holde Tænd-knappen inde i et sekund, og LCD-skærmen vil herefter tænde, når du hører biplyden. "Opvarmningen" vil vises på skærmen, hvilket indikerer, at alkometeret er i opvarmningstilstand. Du vil se nedtællingen gå fra 15 til 0.

Efter en succesfuld opvarmning vil "Pust"-logoet synes på skærmen. Dette betyder, at alkometeret er i Test-tilstand, og der vil starte en nedtælling fra 10 til 0. Tag mundstykket i munden og pust med normal styrke i 2-3 sekunder. Det anbefales at du starter med at puste, så snart nedtællingen begynder, så alkometeret kan nå at absorbere din ånde.

Når skærmen viser mere end 0.050% BAC, eller 0.500‰ BAC, eller 0.250mg/L (BrAC), vil alkometeret advare dig. Under testresultat-tilstand kan du ændre enhederne ved at holde Tænd-knappen inde.

Resultaterne vil vises i omkring 20 sekunder, og alkometeret vil herefter automatisk slukke.

Vil du skifte mundstykket, skal du tage det nye mundstykke ud af dets boks, som findes på bagsiden, og placere det på venstre eller højre side af alkometeret. Hvis batteriet er lavt, vil LCD-skærmen blinke, hvilket indikerer, at batterierne skal skiftes.